

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ВІДНЯ!

Щоб уникнути неконтрольованого поширення коронавірусу, необхідно, щоб всі люди, які проживають у Відні, регулярно проходили тестування на виявлення інфікування вірусом.


За допомогою ПЦР-тесту через полоскання горла ви можете дізнатися про це легко і швидко в будь-який час. Тест ви можете зробити самостійно без медичного персоналу. Просто дотримуйтесь інструкцій у веб-додатку.

Місто Відень надає безкоштовну тестову програму «Alles gurgelt!» для всіх людей, які живуть і працюють у Відні.



ALLES GURGELT: ОСЬ ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Щоб мати можливість виконати тест, вам потрібно

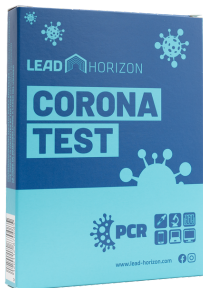

1. Один тестовий набір на одну особу
2. Комп'ютер з веб-камерою / смартфон з підключенням до Інтернету
3. Адреса електронної пошти, до якої ви маєте доступ



Почніть тут:

1. Відскануйте QR-код або введіть його у веб-браузер lead-horizon.org/public




2. Зареєструйтеся та введіть свої персональні дані. Цей крок необхідний для того, щоб ви могли отримати результат тесту і медичну довідку.



Інструкцію для всіх подальших кроків можна знайти на звороті!

Більше інформації про тест на полоскання горла, розробленого фірмою LEAD Horizon, ви можете знайти на сторінці www.lead-horizon.at

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТЕСТОВОГО НАБОРУ ДЛЯ ПЦР-ПОЛОСКАННЯ ГОРЛА

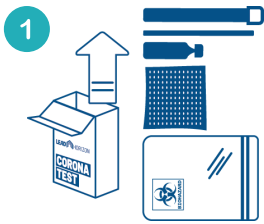

1 Відкрийте коробку, розпакуйте вміст і перевірте повноту набору.



2 Відскануйте QR-код на коробці, веб-додаток WebApp відкривається автоматично.



3 Підготуйте офіційне посвідчення особи з фотографією та відскануйте його за допомогою веб-застосунку WebApp, коли з'явиться відповідний запит.



4 Щоб активувати тест, відскануйте штрих-код (зразок номера) з пробірки для зразків.



5 За допомогою інструкцій у веб-додатку WebApp полоскайте / промивайте горло сольовим розчином протягом 60 секунд.



6 Зразок слини по трубці сплюньте у пробірку.



7 Ємність з виплунутою рідиною покладіть у захисний пакет, добре його закрийте і упакуйте все в картонну коробку. Тестовий комплект віднесіть до пунктів прийому.



8 Результати тесту та медичні висновки надходять електронною поштою. Ви можете отримати їх у своєму особовому профілі у веб-додатку.

Остання версія інструкції по застосуванню доступна для скачування на сторінці www.lead-horizon.com/downloads кількома мовами.



Більше інформації про тест на полоскання горла, розробленого фірмою LEAD Horizon, ви можете знайти на сторінці www.lead-horizon.at